

# INSTRUÇÕES DE USO DA ESCOVA DE LIMPEZA PARA CANAL DE TRABALHO DO ENDOSCÓPIO MEDIKA

## Indicações:

A escova está indicada para limpeza do canal de trabalhos de endoscópios.

## Descrição do produto:

Escova para limpeza de canais de trabalho de endoscópios com 2.0, 2.8 e 3.2 mm de diâmetro, descartável, com comprimento de tubo 2300 mm. O corpo da escova é fabricado em POM, com cerdas em nylon.

## Instruções de uso:

- Este produto é utilizado para limpeza do canal de trabalho do endoscópio.
- Confira cuidadosamente se o endoscópio está em boas condições.
- Escolha a escova no tamanho adequados para o procedimento. O diâmetro externo da escova deve ser menor do que o diâmetro do canal de trabalho e o comprimento deve ser maior.
- Abra a embalagem da escova de limpeza.
- Introduza a escova de limpeza e empurre cuidadosamente pelo canal de trabalho do endoscópio.
- Puxe a escova de limpeza pela extremidade distal e retire-a do canal de trabalho do endoscópio.
- Descarte os produtos conforme RDC 222 de 28 de março de 2018 da ANVISA.

## Informações técnicas:

**A escova de limpeza para canal de trabalho de endoscópico Medika não se enquadra como produto para saúde segundo RDC 751 de 2022.**

### Fornecedor:

HTS–Tecnologia em Saúde, Comércio, Importação e Exportação Ltda  
Rua Aleomar Baleeiro, 15 -Lagoa Santa- MG 33.230-124  
SAC:(31) 36881901 www.medika.com.br

### Fabricante:

Beijing ZKSK Technology Co., Ltd.,  
9, 6 & No.6 Yuan Hengye North 7th street, Yongle Economic Development Zone, 101105325025 - Tongzhou, Beijing – China

## FORMAS DE APRESENTAÇÃO

Todos os modelos apresentados são revestidos com PTFE.

-Embalagem secundária: Saco plástico em PE. Cada embalagem secundária contém 200 embalagens primárias.

Embalagem primária: polietileno.

Cada embalagem primária contém:

01 escova de limpeza para canal de trabalho de endoscópio, com tubo com extensão compatível com canal de trabalho de 2.8 mm de diâmetro externo, por 2300 mm de comprimento, com dupla escova com cerdas em nylon.

## ACESSÓRIOS

Relação das partes e acessórios a integrar o produto, assim como de todos opcionais e materiais de consumo por ele utilizados.  
Não há.

## INDICAÇÕES, FINALIDADE E USO A QUE SE DESTINA O PRODUTO

A escova está indicada para limpeza do canal de trabalhos de endoscópios.

## PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS, EFEITOS COLATERAIS, ESCLARECIMENTOS SOBRE O PRODUTO BEM COMO SEU ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

**Não aplicável.**