

# INSTRUÇÕES DE USO DA ESCOVA DE LIMPEZA PARA CANAL DE TRABALHO DO ENDOSCÓPIO JIUHONG MEDICAL

## Indicações:

A escova está indicada para limpeza do canal de trabalhos de endoscópios.

## Descrição do produto:

Escova para limpeza de canais de trabalho de endoscópios com 2,0, 2,8 e 3,2 mm de diâmetro, descartável, com comprimentos de tubo de 1200, 1800 e 2300 mm. O corpo da escova é fabricado em POM, com cerdas em nylon. O modelo inovador de tripla escova melhora os resultados da limpeza.

## Instruções de uso:

- Este produto é utilizado para limpeza do canal de trabalho do endoscópio.
- Confira cuidadosamente se o endoscópio está em boas condições.
- Escolha a escova no tamanho adequados para o procedimento. O diâmetro externo da escova deve ser menor do que o diâmetro do canal de trabalho e o comprimento deve ser maior.
- Abra a embalagem da escova de limpeza.
- Introduza a escova de limpeza e empurre cuidadosamente pelo canal de trabalho do endoscópio.
- Puxe a escova de limpeza pela extremidade distal e retire-a do canal de trabalho do endoscópio.

## Informações técnicas:

Modelo: Tripla escova			
Código	Canal de trabalho do endoscópio (mm)	Comprimento do tubo (mm)	Diâmetro da escova (mm)
JHY-CB-06-180-D	2,8-3,2	1800	06
JHY-CB-06-230-D	2,8-3,2	2300	06
JHY-CB-03-120-D	2,0	1200	03
JHY-CB- 03-180-D	2,0	1800	03

Versão da instrução de uso – Vr.02

**Alerta!** Observe a correlação da versão da instrução de uso com a versão (Vr) que consta no rótulo do produto adquirido.  
Para obter o formato impresso da instrução de uso, sem custo adicional, solicite através do e-mail: [qualidade@medika.com.br](mailto:qualidade@medika.com.br).

Modelo: Dupla escova

Código	Canal de trabalho do endoscópio (mm)	Comprimento do tubo (mm)	Diâmetro da escova (mm)
JHY-CB-06-180-C	2,8-3,2	1800	06
JHY-CB-06-230-C	2,8-3,2	2300	06
JHY-CB-03-120-C	2,0	1200	03
JHY-CB- 03-180-C	2,0	1800	03

A escova de limpeza para canal de trabalho de endoscópio JiuHong Medical não se enquadra como produto para saúde segundo RDC 185 de 2001.

## Fabricado por:

Changzhou JiuHong Medical Instrument Co., Ltd  
No.128, Mingxin West Road, Wujin District, Changzhou,  
Jiangsu, China - 213164  
Telefax : 0086-0519—85071234

## Fornecedor:

HTS–Tecnologia em Saúde, Comércio, Importação e Exportação Ltda  
Rua Aleomar Baleeiro, 15 -Lagoa Santa- MG 33.400-000  
SAC:(31) 36881901 [www.medika.com.br](http://www.medika.com.br)

## Responsável técnico:

Enfª. Ingrid Neves COREN-MG 764669-ENF

## Legenda da simbologia da rotulagem:



**Lote**  
**Data de**  
**fabricação**  
**Data de Validade**  
**Referência**